



Vhodný do
UZV čističek

Tekutý dezinfekční přípravek s mycími účinky na bázi kombinace aminu, fenoxipropanolu a KAS. Vhodný pro manuální dezinfekci a čištění chirurgického instrumentária a rigidních endoskopů. Zvláště vhodný do ultrazvukových čističek.

gigasept® instru AF

Naše plus:

- Bez obsahu aldehydů
- Excelentní čistící vlastnosti
- Příjemná svěží vůně
- Zkrácený čas pro UZV čištění

Oblast použití:

gigasept® instru AF je vhodný k manuální dezinfekci a čištění termostabilních a termolabilních nástrojů všeho druhu (mimo flexibilní endoskopy). Vynikajících výsledků dosahuje při použití v ultrazvukových čističkách.

Návod na použití:

gigasept® instru AF se ředí vodou na požadovanou koncentraci pracovního roztoku. Endoskopy a nástroje určené k reprocessingu, se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněné všechny duté části po stanovenou dobu expozice. Po expozici a následném čištění se endoskopy a nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou pitnou vodou.

gigasept® instru AF dosahuje výborných čistících účinků při použití v ultrazvukových čističkách. Pracovní roztok by neměl přesáhnout teplotu 40 °C. Při znečištění je nutno roztok vyměnit.

gigasept® instru AF je vhodný pro dezinfekci a čištění nástrojů z kovů, gumy, skla, porcelánu, plastů (částečně i polykarbonáty).

Nedoporučuje se míchat **gigasept® instru AF** s jinými produkty či detergenty. Reaguje s aldehydy. Veškeré aplikační pomůcky a dezinfekční nádoby před použitím řádně opláchněte vodou.

Nepoužitý pracovní roztok je stabilní po dobu 7 dnů.

Použití	Koncentrace	Expozice
Manuální dezinfekce nástrojů	0,5%	5 min

Účinnost:

Baktericidní, Fungicidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV) / Adeno / Papova SV 40, mykobaktericidní

Účinnost	Norma	Doba expozice			
		5 min.	15 min.	30 min.	1 hod.
Baktericidní	DGHM EN 13727 EN 14561	0,25% 0,25%	3% 0,05%	2% 0,025%	1,5% 0,01%
MRSA	EN 13727	0,50%			
Virucidní (BVDV/Vaccinia/Rota)	DVV/RKI	0,50%			
Virucidní (Adeno, Polyoma SV40)	DVV/RKI				4%
Levurocidní (C. albicans)	DGHM EN 13624 EN 14562	0,25% 0,25%	3% 0,25%	2% 0,1%	1,5% 0,05%
Fungicidní (C. albicans, A. niger)	EN 13624 EN 14562	3% 4%	2% 3%	2% 2%	0,5% 1,5%
Tuberkulocidní (M. terrae)	DGHM EN 14563		3% 2%	2% 1%	1,5% 0,5%
Mykobaktericidní (M. avium, M. terrae)	EN 14348 EN 14563		2% 3%	2% 2%	1% 1%

gigasept® instru AF

Složení:

100 g roztoku **gigasept® instru AF** obsahuje následující aktivní látky:

- 14 g Cocospropylendiaminguanidindiacetat
- 35 g Phenoxypropanole
- 2,5 g Benzalkoniumchlorid

Další složení:

- 5–15% neionogenní tensidy
- inhibitory koroze, barvivo, parfém

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

vzhled hodnota pH	zelená kapalina cca. 9,3
----------------------	-----------------------------

Zvláštní upozornění:

Pouze pro profesionální trh. Nemíchejte gigasept instru AF s jinými produkty či detergenty.

Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
gigasept® instru AF	2 l	5
	5 l	1

Doba expirace:

36 měsíců

Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. IIa [CE 0297]

Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.



Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu léčiv dle GMP certifikátu.



Součást skupiny Air Liquide.

Další informace:

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Výrobce:

Schülke & Mayr GmbH
Rober-Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 725 835 047

Area Sales manažer ČR: tel.: +420 724 013 101

Manažer pro distributory ČR: tel.: +420 724 176 368

Area Sales manažer SR: tel.: +421 911 288 808

Manažer pro distributory SR: tel.: +421 903 262 932

Distributor v ČR:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 326
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk