

Svoboda v otiskování



Variotime je inovativní A-silikon, který garantuje výborné výsledky a je variabilní při zhotovování otisku. Vyzkoušejte výjimečnou kombinaci přesnosti a adaptability při samotném otiskování.

- Variabilní a inteligentní časový koncept pro flexibilitu pracovního času a počátku tuhnutí
- Pozoruhodná přesnost a výjimečná reprodukce detailů díky objemové stabilitě a vysoké povrchové smáčenlivosti
- Široké spektrum indikací – jeden systém pro všechny otiskovací techniky

Variotime – časový koncept tuhnutí

	Variabilní pracovní čas Dle potřeby od 1:00 min do 2:30 min!	Krátký intraorální čas tuhnutí Vždy 2:30 min!
Otisk rozsáhlé práce	2:30	2:30
Otisk malé práce	1:00	2:30

Více volnosti v začátku tuhnutí – Variotime kontroluje kinetiku polymerace otiskovací hmoty teplotou v ústní dutině a tuhne rychle po vložení do úst.

Variotime zubnímu lékaři přináší

■ Větší flexibilitu

Díky variabilnímu pracovnímu času může být Variotime používán pro jednorunkové práce i pro mnohopilířové rekonstrukce.

■ Efektivní přípravu

Při použití Dynamix systému nebo automix kartuší je Variotime vždy rychle a přesně namíchán při současně úspoře času i materiálu.

■ Vysoce spolehlivý a kvalitní materiál

Automatické míchání garantuje homogenně připravený materiál, který je vždy v konstantní a reprodukovatelné kvalitě.

■ Vysokou přesnost

Vyjímečná přesnost a vynikající reprodukce detailů díky objemové stabilitě a hydroaktivnímu povrchu.

■ Více pohodlí

Důležitou vlastností Variotimu je permanentní objemová stabilita, která umožňuje zhotovit několik přesných modelů z jediného otisku.

Variotime přináší pacientovi

■ Více komfortu

Díky krátké době tuhnutí v ústní dutině je pro pacienta otiskování pohodlnější.

■ Více jistoty

Díky vysoké přesnosti materiálu se zmenšuje riziko nutnosti opakování nezdařeného otisku.

Variotime

Inovativní A-silikonová otiskovací hmota zajišťující přesnost i variabilní pracovní čas se širokými možnostmi indikací



■ korunky a můstky


■ inlaye a onlaye

■ fixační otisky a otisky implantátů

■ funkční otisky


Variotime Extra Light Flow and Medium Flow

Korekční nízkoviskózní materiály s vynikajícími tokovými vlastnostmi ideálními pro vámi preferovanou techniku otiskování

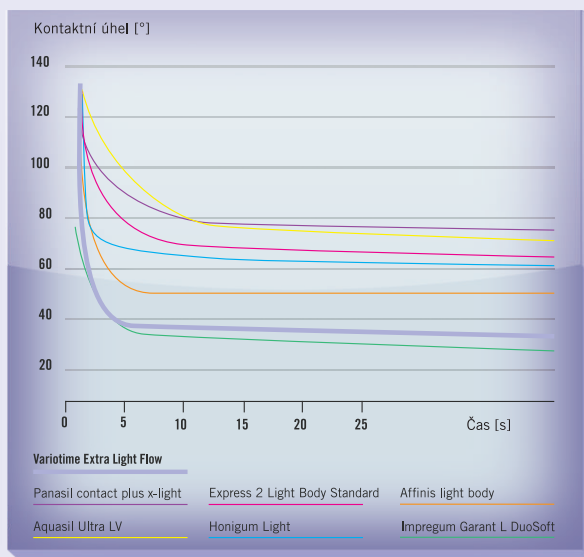

Kontaktní úhel kapky vody na povrchu Variotime Extra Light Flow – měření pro zjištění hydrofilie – je na úrovni polyéterů* a demonstruje vynikající chování Variotimu ve vlhkém prostředí gingiválního sulku.

* Zdroj: Geis-Gerstorfer, J.: Hochaufgelöste Kontaktwinkel-Messungen, University of Tübingen, Germany, May 2009, data on file.

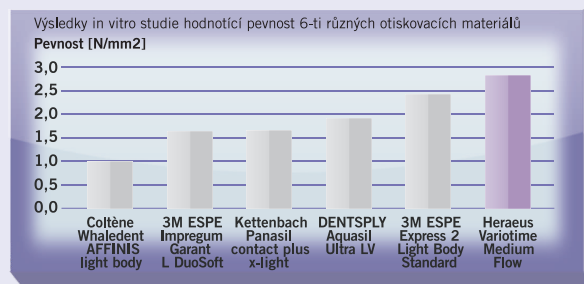

Variotime Medium Flow vykazuje nejvyšší pevnost mezi testovanými otiskovacími materiály*, která zajišťuje odolnost otisku při vyjímání z úst a snižuje riziko odtržení okraje otisku v oblasti sulku.

* Zdroj: Thermoplastic Testing Centre, Bayer Material Sciences AG, Krefeld-Uerdingen, Germany, March 2009, data on file.

Balení	Obj. číslo	Obsah
Refills		
Variotime Dynamix Putty Refill	66044995	3 x (2 x 380 ml), včetně příslušenství
Variotime Dynamix Heavy Tray Refill	66045000	3 x (2 x 380 ml), včetně příslušenství
Variotime Dynamix Monophase Refill	66045034	3 x (2 x 380 ml), včetně příslušenství
Příslušenství Dynamix Refills: Dynamix Mixing Tips, Dynamix fixační kroužek		
Variotime Easy Putty Refill	66044993	4 x (1 x 600 ml), včetně příslušenství
Příslušenství Easy Putty Refills: dávkovací lžičky		
Variotime Heavy Tray Refill	66044998	6 x (2 x 50 ml), včetně příslušenství
Variotime Monophase Refill	66045032	6 x (2 x 50 ml), včetně příslušenství
Příslušenství Automix Cartridge Heavy Tray / Monophase Refills: Mixing Tips zelené		
Variotime Medium Flow Refill	66045036	6 x (2 x 50 ml), včetně příslušenství
Variotime Light Flow Refill	66045038	6 x (2 x 50 ml), včetně příslušenství
Variotime Extra Light Flow Refill	66045040	6 x (2 x 50 ml), včetně příslušenství
Příslušenství Automix Cartridge Flow Refills: Mixing Tips žluté		
Variotime Bite Refill	66045042	3 x (2 x 50 ml), včetně příslušenství
Příslušenství Automix Cartridge Bite Refi II: Mixing Tips zelené		
Trial Kit		
Variotime Easy Putty & Light Flow Trial Kit	66045044	1 x (1 x 600 ml) Easy Putty, 1 x 50 ml Light Flow, včetně příslušenství
Příslušenství Trial Kit: Mixing Tips žluté, Intraoral Tips žluté, Universal Adhesive		



Oficiální distributori Heraeus Kulzer

INTERDENT s.r.o.
Foerstrova 12, 100 00 Praha
www.interdent.cz
tel.: +420 274 783 114

Dentamed (ČR) spol. s r.o.
Pod Lipami 41, 130 00 Praha
www.dentamed.cz
tel.: +420 266 007 111

Hu-Fa Dental a.s.
Moravni 909, 765 02 Otrokovice
www.hufa.cz
tel.: +420 557 926 226-9

HENRY SCHEIN DENTAL s.r.o.
Libušská 210, 142 00 Praha 4
www.henryschein.cz
tel.: +420 800 700 097

Heraeus Kulzer - Česká republika

Martin Kutáč - country manager
mobil: +420 724 509 000
e-mail: martin.kutac@heraeus-kulzer.cz
web: www.heraeus-kulzer.cz

Šárka Skalická - odborný reprezentant
mobil: +420 774 535 131
e-mail: sarka.skalkicka@heraeus-kulzer.cz

Andrea Kopečná - odborný reprezentant
mobil: +420 608 820 920
e-mail: andrea.kopečna@heraeus-kulzer.cz

Navštivte naše nové webové stránky **www.heraeus-kulzer.cz**