

# 3M™ Filtek™ Universal

Je čas zjednodušit si život.



## 8 odstínů. 1 univerzální opacita. Nemůže to být snadnější.


Efektivita je klíčem k úspěchu, protože 80 % lékařů používá jeden odstín pro většinu jejich případů\*. A pro tyto případy jsme vytvořili výplňový materiál Filtek™ Universal.

### Snadný systém výběru odstínu

Pouze 8 odstínů a jeden extra bílý (XW - Extra White) pokrývají klasických 19 VITA odstínů a odstíny pro vybělené zuby. Navíc odstíny mají univerzální opacitu, takže splňují většinu klinických potřeb.


- **Technologie NaturalMatch** je zajištěna nanoplínivem, inovativními monomery snižující smrštění a napětí a pigmenty, které umožňují přirozené splynutí jednoho odstínu s okolím zubu
- **Fluorescentní pigmenty** zlepšují vzhled
- **3M technologie nanofilního plniva** umožňuje zvýšenou radioopacitu

#### 8 odstínů:

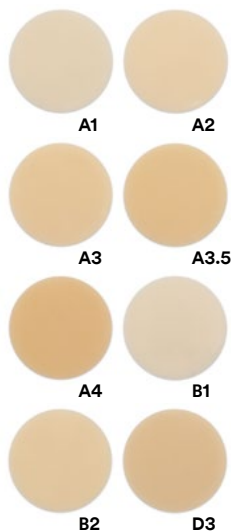

**Pink Opaquer a Extra White odstín (XW) vám zajistí vynikající estetiku ve specifických situacích.**

Díky optickým vlastnostem a vysoké opacitě **Pink Opaquer** poskytuje skvělé zakrytí kovu nebo tmavých skvrn na dentínu.

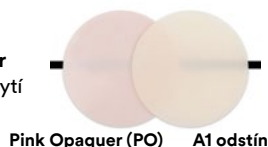

**Odstín Extra White pro pacienty, kteří mají vybělené zuby.**




### Nová třída univerzálních kompozit


Od okamžiku vytvrzení kompozitu je kompozitní výplň namáhána žvýkáním, nebo také čištěním zubním kartáčkem. Pro zvýšení životnosti výplně jsme poprvé u univerzálního kompozitu spojili naše osvědčené technologie.

#### Technologie inovativních monomerů snižující napětí a smrštění

**Nové monomery** v našich bulkfillových kompozitech, které pomáhají chránit výplně jsou nyní i ve **Filteku Universal**. Eliminují tak problémy způsobené polymeračním smrštěním a napětím.

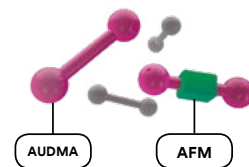

**3M patentovaná nanotechnologie** Osvědčené a jedinečné nanofilní částice spojené v **nanoklastrech** poskytují výplním **excelentní** dlouhotrvající lesk, a zároveň i **vysokou pevnost a vynikající** odolnost proti opotřebení.

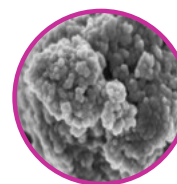

100K zvětšení nanoklastrů. Fotografie poskytl J. Perdigo, Univerzita Minnesota.

## Hlavní výhody

- **Jednoduchý systém 8 odstínů:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3
- **Univerzální opacita** umožňuje skvělé splynutí s okolím zubu
- Vynikající manipulace a modelace
- **Vylepšený odstín** pro bělené zuby Extra White (XW)
- **Pink Opaquer** pro maskování tmavého dentinu, skvrn a kovů
- Patentovaná **3M nanotechnologie** zajišťuje odolnost proti otěru, skvělou leštitelnost a dlouhodobou stálost naleštění
- Aplikovaná technologie **inovativních monomerů** napětí a smrštění
- **Vysoká radiopacita**
- **Unikátní design koncovky** kompulí pro lehčí přístup do hlubokých kavit
- Kompule mohou být **bezpečně nahřívány**

## Indikace

- Přímé výplně ve frontálním a postranním úseku
- Dostavby jádra
- Dlahování
- Nepřímé výplně ve frontálním a postranním úseku včetně inlají, onlají a fazet



## Informace pro objednání

### 3M™ Filtek™ Universal

Objednací číslo    Popis produktu

**6570CK**    **3M™ Filtek™ Universal balení kompulí**  
Obsah: 80 × 0,2 g kompulí: 20 × A1, A2, A3, A3.5; 10 × – 0,2 g kompulí Pink Opaquer

**6570SK**    **3M™ Filtek™ Universal balení tub**  
Obsah: 5 × 4 g tuby: 1 × A1, A2, A3, A3.5 a Pink Opaquer

Doplňkové balení	Objednací číslo #	Objednací číslo #
<b>ODSTÍN</b>	<b>TUBY</b>	<b>KOMPULE</b>
A1	6570A1	6575A1
A2	6570A2	6575A2
A3	6570A3	6575A3
A3.5	6570A3.5	6575A3.5
A4	6570A4	6575A4
B1	6570B1	6575B1
B2	6570B2	6575B2
D3	6570D3	6575D3
XW – Extra bílý	6570XW	6575XW
PO – Pink Opaquer	6570PO	6575PO
Doplňková balení	KOMPULE – obsahují 20 × 0,2 g	TUBY – obsahují 1 × 4 g
PINK OPAQUER (PO) doplň. bal.	KOMPULE – obsahují 10 × 0,2 g	TUBY – obsahují 1 × 4 g



Všechna doplňková balení obsahují návod na použití.

[www.3M.cz/dental](http://www.3M.cz/dental)



My uMíMe zuby



3M Oral Care Solution Division  
3M Česko spol. s r. o.  
V Parku 2343/24  
148 00 Praha 4

3M a Filtek jsou ochranné známky  
3M nebo 3M Deutschland GmbH.  
© 3M 2019. Všechna práva vyhrazena.