

Rýchly návod



Pred použitím uvedených produktov si prečítajte návod k ich použitiu.



3M™ RelyX™ Universal Živicový cement

- ▶ Duálne tuhnúci živicový cement
- ▶ Adhezívna a samoadhezívna indikácia
- ▶ Odtiene TR, A2, A3O, WO

3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhezívum

- ▶ Self-etch, selective-etch a total-etch adhezívum
- ▶ MDP monomér pre zirkón, kov, kompozit
- ▶ Silan pre sklokeramiku, kompozitné čapy so sklenenými vláknami

1. Výber materiálu a spôsob jeho prípravy

Kompozitné čapy so sklenenými vláknami¹



Zirkón², Alumina², Kov²



Kompozity, hybridné materiály



Sklokeramika³



2. Príprava zubu podľa indikácie

Možnosť 1: Samoadhezívne pre:

- Čap
- Korunka
- Mostík



Bez potreby adhezíva na zub

Možnosť 2: (Selective-Etch) Adhezívne pre:

- Inlay
- Onlay




Podľa potreby na nabrúsenú sklovinu

Možnosť 3: (Total-Etch) Adhezívne pre:

- Oklúzna fazeta
- Fazeta
- Adhezívny mostík



3. Prilepenie náhrady podľa krokov A-D

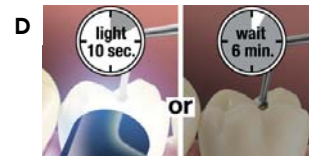

¹ Priming nieje potrebný pre 3M™ RelyX™ Fiber Posts ² Priming podľa potreby, doporučený pre fazety, oklúzne fazety, adhezívne mostíky ³ Alternatívny primer: naneste silan, napr. 3M™ RelyX™ Ceramic Primer