

Ako používať striekačku 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement

Správne



Prípevnite mikro miešaciu kanylu 3M™ RelyX™ Universal tesne pred použitím cementu

1. nasadíte kanylu na striekačku až na doraz
2. otočením o 90° v smere šípky kanylu zaistíte

Tento postup otvára ventil striekačky RelyX Universal a umožňuje vytlačenie oboch pást do miešacej kanyly.



V prípade cementácie koreňového čapu pripojte endo koncovku k mikro miešacej kanyle. Podprite prstom miešaciu kanylu tak, aby nedošlo k jej ohnutiu.



Piest vždy stláčajte primeranou silou rovnobežnou s osou striekačky.

Pred aplikáciou cementu RelyX Universal do náhrady alebo do kavity najprv vytlačte malé množstvo pasty na podložku, aby sa obe jej zložky následne miešali v rovnakom pomere.



Ihneď po aplikácii cementu RelyX Universal zložte použitú mikro kanylu a zlikvidujte ju.

Mikromix striekačka RelyX Universal je samo-uzatvárateľná a umožňuje hygienické skladovanie bez použitia miešacej kanyly.

Ako používať striekačku 3M™ RelyX™ Universal Resin Cement

Nesprávne



Nepoužívajte žiadny nástroj k otočeniu alebo rozoberaniu samo-uzatvárateľného ventilu.

Pre zaistenie riadnej funkcie musí byť ventil v správnej, uzavretej počítateľnej pozícii.



Netlačte na piest, pokiaľ nieje správne nasadená mikro miešacia kanyla 3M™ RelyX™ Universal.

Mikromix striekačka je konštruovaná tak, aby sa pasta dala vytlačiť iba s novou, správne upevnenou mikro miešacou kanylou.



Netlačte príliš na piest. Pokiaľ pasta nieje vytlačaná pod miernym tlakom, prestaňte, aby nedošlo k poškodeniu striekačky mikromix.

Skontrolujte miešaciu kanylu (musí byť nepoužitá) a správnosť jej upevnenia (musí byť úplne zatlačená dolu a otočená o 90°). Pokiaľ problém pretrváva, zavolajte zákaznícky servis 3M.



Nepokúšajte sa nasť pastu späť vyťahovaním piestu zo striekačky mikromix. To by mohlo striekačku upchať.

Nevyťahujte piest v priebehu čistenia. Mohlo by dojsť k nasatiu vzduchu do striekačky.