

schülke -†



Na citlivé
povrchy

Dezinfekčné vreckovky na báze kvartérnych amóniových zlúčenín určené k rýchlej dezinfekcii malých plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov. Vhodné na dezinfekciu povrchov a predmetov materiálov citlivých na alkohol.

mikroqid[®] sensitive wipes

Naše Plus

- Vhodné na citlivé povrchy
- Okamžité použitie
- Zaručujú rýchly dezinfekčný efekt - už od 1 minúty
- Pohodlné a jednoduché použitie

Oblasti použitia

Mikroqid sensitive wipes sa odporúčajú k rýchlej dezinfekcii malých plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov (stoly, vozíky, kľučky, dvere, pomôcky atď.). Vhodné k dezinfekcii povrchov citlivých na alkohol. Prípravok je vhodný tam, kde je potrebná rýchla a účinná dezinfekcia zdravotníckych pomôcok ako napr.:

- Povrchy v blízkosti pacientov
- Kontaktné plochy
- Ordinácie
- Plastové a akrylátové povrchy
- UZV sondy
- Klávesnice

Účinnosť

Baktericídny, levurocídny, virucídny (BVDV, Noro, Rota, Polyoma SV 40, Vaccinia - HBV, HCV, HIV).

Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Mikroqid sensitive wipes sa používajú na povrchy vopred zbavené viditeľného znečistenia. Vyberte z dózy potrebný počet vreckoviek a utierajte nimi povrchy určené k dezinfekcii; dbajte pritom na dôkladné namočenie povrchu. Kryt dózy uzavrite hneď po vytiahnutí potrebného množstva vreckoviek.

Výrobca garantuje životnosť produktu po otvorení po dobu 3 mesiacov.

CE 0297



mikrozid[®] sensitive wipes

Zloženie

100 g roztoku mikrozid sensitive wipes obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 0,26 g Kvartérne amoniove# zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy
- 0,26 g Kvartérne amoniove# zlúčeniny, didecyldimethylammonium chlorid
- 0,26 g Kvartérne amoniove# zlúčeniny, C12-14-alkyl [(ethylphenyl) methyl] dimehtyl, chloridy

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	Nepoužiteľné
Dynamická viskozita	Údaje sú nedostupné
Farba	bezfarebný
Forma	Vodný roztok na ovčie rúno stieračiek
Hustota	cca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C / aktívneho roztoku
pH	6 - 8 / 100 % / 20 °C / aktívneho roztoku



Zvláštne upozornenia

Určené pre profesionálny trh. Po použití dózy vždy dôkladne uzavrite. Chráňte pred teplom a slnečným svetlom. Používajte ochranné rukavice.

Doba expirácie: 24 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
mikrozid sensitive wipes premium 100 ks	6/Kartón	70000807
Mikrozid sensitive wipes premium 48 ks	16/Kartón	165711
mikrozid sens wipes Jum Ref 200 ST BT	12/Kartón	70001404
Mikrozid sens. w. 200 ks, jumbo dóza	10/Kartón	109184

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok triedy IIa



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com