



perform®

Práškový dezinfekční přípravek na bázi aktivního kyslíku. Vhodný pro dezinfekci a mytí veškerých omyvatelných ploch a povrchů zdravotnických prostředků.

plně virucidní od 0,5%

Naše plus:

- Univerzální použití
- Bez chloru
- Výborné čistící vlastnosti
- Výborná materiálová kompatibilita
- Široké spektrum účinnosti
- Použití i za přítomnosti pacientů
- Nedráždí dýchací cesty
- Excelentní virucidní účinek

Oblast použití:

perform® se používá k dezinfekci a čištění ploch a povrchů zdravotnických prostředků. Je vhodný na veškeré omyvatelné plochy a povrchy. Je vhodný zejména k dezinfekci v místech, kde jsou vysoké nároky na uživatelský komfort a ohleduplnost k životnímu prostředí. perform® vykazuje výbornou materiálovou kompatibilitu i s problematickými materiály jako je např. akrylátové sklo (inkubátory). Přípravek je také vhodný k dezinfekci ochranných a inhalačních dýchacích masek, resuscitačních figurín, otiskovacích hmot atd.

Návod na použití:

Pro přípravu pracovního roztoku rozmícháme příslušné množství přípravku ve vlažné vodě. Plochy a povrchy předmětů otřete textilií smočenou v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Dýchací masky a školící figuríny otřete textilií smočenou v roztoku a po době expozice opláchnete vodou / otřete vlhkou textilií. Nepoužitý pracovní roztok je stabilní po dobu 30 hodin.

Použití	Koncentrace	Expozice
Dezinfekce a čištění ploch a povrchů ZP	0,5%	30 min.
Dezinfekce a čištění ploch a povrchů ZP	1%	30 min.
při zvýšené zátěži (ARO, JIP...)	0,5%	60 min.

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní

Účinnost	Norma	Doba expozice						
		1 min.	2 min.	5 min.	15 min.	30 min.	1 hod.	2 hod.
Baktericidní	DGHM ²					1%	0,5%	
	DGHM ¹				2%	0,5%		
	EN 13727 ¹	1%	0,5%					
	EN 13727 ²					1%	0,5%	
	EN 13697 ²					0,5%		
	DGHM (MRSA)						0,5%	
Levurocidní (C. albicans)	DGHM ¹				2%	0,5%		
	EN 13624 ¹				1%		0,5%	
Fungicidní (A. niger)	EN 13697 ²						1%	
Virucidní (BVDV, Vaccinia)	DVV/RKI			0,5%				
Virucidní (Polyoma SV40)	DVV/RKI	0,5%						
Virucidní (Adeno)	DVV/RKI a EN 14476			0,5%				
Virucidní (Noro)	EN 14476 ¹			0,5%				
	EN 14476 ²					0,5%		
Virucidní (Polio)	DVV/RKI				3%	2%		
	EN 14476 ¹			1%	0,5%			
Virucidní (FCV)	DVV/RKI			0,25%				
Mykobaktericidní (M. avium, M. terrae)	EN 14348 ¹				1%		0,5%	
	EN 14348 ²					1,5%	1%	
Tuberkulocidní (M. TBC)	DGHM ¹						0,5%	
	DGHM ²					3%	2%	
Sporocidní (C. difficile, B. subtilis)	EN 13697 ¹							1%

1 – nižší zátěž, 2 – vyšší zátěž

Složení:

100 g přípravku **perform®** obsahuje následující aktivní látky:

- 45g monopersíran draselný, sodná sůl

Další složení:

5–15% anionaktivní tensidy

< 5% neionogenní tensidy

< 5% fosfonáty

< 5% mýdlo

Doba expirace:

24 měsíců

Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. IIa [CE 0297]

Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

granulát	
vzhled hustota	bílý prášek / granulát cca. 775 g/l
roztok	
vzhled hodnota pH	bezbarvý cca. 4

Zvláštní upozornění:

Pouze pro profesionální trh. Při skladování nepřekračujte pokojovou teplotu. Používejte ochranné rukavice (např. z butylkaučuku). Při použití na textilie může mít bělicí účinky.

Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
perform®	sáček 40g dóza 900 g	250 4



Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu léčiv dle GMP certifikátu.



Součást skupiny Air Liquide.

Další informace:

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Výrobce:

Schülke & Mayr GmbH
Rober-Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 725 835 047

Area Sales manažer ČR: tel.: +420 724 013 010

Manažer pro distributory ČR: tel.: +420 724 176 368

Area Sales manažer SR: tel.: +421 911 288 808

Manažer pro distributory SR: tel.: +421 903 262 932

Distributor v ČR:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 326
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievdza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk