

Riešenia na retrakciu gingivy pred odtlačaním

3M™ ESPE™

Adstringentná retrakčná pasta



Rýchle a jednoduché
riešenie retrakcie gingivy


NOVÉ!

Vhodná pre polyéterové aj
A-silikónové odtlačkové hmoty



3M ESPE

Jednoduchá retrakcia vďaka novej retrakčnej kapsli

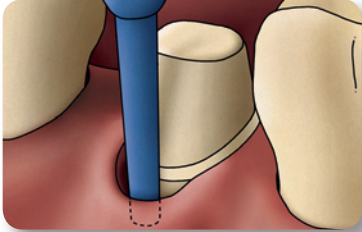

Viac ako 45 rokov sa firma 3M™ ESPE™ zaoberá oblasťou dentálneho odtlačania. Či už vďaka vynálezu polyéterovej odtlačkovej hmoty Impregum™ alebo nedávnomu digitálnemu konceptu "3D v pohybe", moderné stomatologické odtlačanie si ťažko predstaviť bez prítomnosti 3M™ ESPE™. Nová retrakčná pasta zavádza ďalší míľnik: predstavuje jednoduchý a rýchly spôsob dosiahnutia gingiválnej retrakcie. Vďaka jemnej špičke kapsle je možné retrakčnú pastu pohodlne aplikovať na miesto určenia - hlboko do sulku, ktorý otvorí a vysuší už behom 2 minút.

Indikácie

3M ESPE Adstringentná retrakčná pasta je indikovaná na dočasnú retrakciu marginálnej gingivy, dosiahnutie otvoreného a suchého sulku, (pri zdravom parodontu), pri dentálnych zákrokoch ako sú:

- Protetické odtlačanie (hmotami alebo digitálne)
- Preparácia dočasných odliatkov
- Preparácia kavít triedy II a V

Tento výrobok sa nesmie používať pri pacientoch trpiacich chorobami parodontu, otvorenými furkáciami, obnaženou kosťou.



Vlastnosti a výhody výrobku:

Všeobecné výhody:

- Umožňuje dosiahnutie čistého, suchého sulku a dlhodobej hemostázy
- Účinne otvára sulkus
- Aplikácia na 1 až 3 zuby použitím jednej kapsle



Výhody oproti vláknam:

- Ľahký a časovo úsporný postup: až o 50 % rýchlejší
- Nižšie riziko krvácania po odstránení
- Šetrný účinok na tkanivo, komfortný pre pacienta



In-vivo aplikácia adstringentnej retrakčnej pasty

Výhody oproti iným pastám:

- Ľahšia aplikácia do sulku a lepší aproximálny prístup vďaka jemnej špičke kapsle
- Hygienická jednorázová forma, predchádza problémom s krížovou kontamináciou
- Aplikovateľná väčšinou dávkovacích pištolí na kompozity

“ Na novom výrobku od 3M ESPE na retrakciu gingivy mi najviac vyhovuje jednoduchosť použitia, priame jednorázové dávkovanie a predovšetkým jeho účinnosť.”

Dr. Nicola, Taliansko



Ľahké zavedenie do sulku a jeho následné otvorenie




Orientačný pásik zodpovedá veľkosťou a tvarom špičky paro sondy. Slúži na presnú navigáciu prieniku koncovky v sulku.

Jednoduché vytlačanie vysoko vizkóznejskej pasty



Hygienická a čistá jednorázová kompula

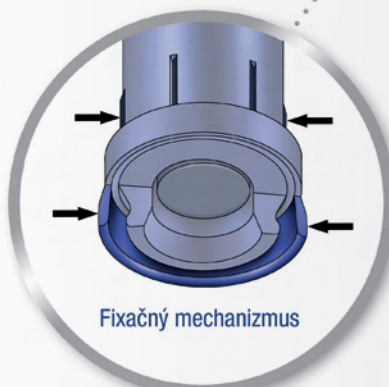

Bezpečná a stabilná aplikácia z bežne používaných pištoľových aplikátorov

“ Jednoduchý a účinný spôsob dosiahnutia gingiválnej retrakcie pred odtlačaním alebo priamou rekonštrukciou. Lepší než retrakčné výrobky, ktoré som používal v minulosti.”

Dr. Anderson, Veľká Británia

Adstringentná retrakčná pasta


Pracovný postup - krok za krokom - na dosiahnutie otvoreného, suchého sulku

1



Vyberte z balenia kapslu a založte ju do dávkovacej pištole (vyhovuje väčšina pištolí na kompozity). Vytlačte na podložku malé množstvo pasty, ktoré znehodnoťte.

2

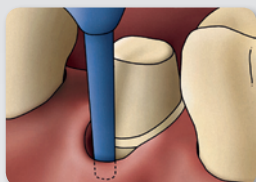


Špičku retrakčnej kapsle zavedte do sulku preparovaného zubu. Mäkké tkanivo je mechanicky odtlačené.

3



Pomaly a kontinuálne vytlačajte retrakčnú pastu po obvode sulku, pokiaľ ho úplne nenaplníte.


4

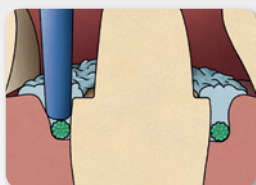

VOLITEĽNÝ POSTUP: POUŽITIE S VLÁKNOM

Na výraznejšie odklonenie gingivy od zubu je možné použiť retrakčnú pastu aj s konvenčným retrakčným vláknom.

5

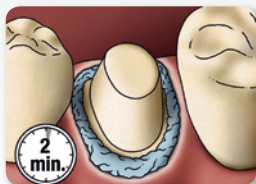

Adstringentnú retrakčnú pastu ponechajte v sulku pôsobiť minimálne 2 minúty.

6



Nakoniec pastu úplne odstráňte zo sulku pomocou prúdu stlačeného vzduchu a vody. Po vysušení môžete odtlačat' dokonale pripravený sulkus.

Objednávacie informácie

Obj. č.	Obsah balenia
56944	3M™ ESPE™ Adstringentná retrakčná pasta Doplňujúce balenie – 25 kapslí
56945	3M™ ESPE™ Adstringentná retrakčná pasta Klinické balenie – 100 kapslí

3M ESPE

3M Slovensko s. r. o.

Vajnorská 142, 831 04 Bratislava
Tel. 02 / 49 105 211
Fax: 02 / 44 454 476
Email: innovation.sk@mmm.com
www.3m.sk



3M, ESPE, Impregum a Lava sú obchodnými značkami 3M alebo 3M Deutschland GmbH. 3M 2013. Všetky práva vyhradené.

Prosím recyklujte. Vytlačené na Slovensku.