

Polyéterové odtlačkové hmoty od 3M ESPE

Vylepšite svoju každodennú prácu vysokou presnosťou odtlačovania

Od uvedenia polyéterových odtlačkových hmôt na trh pred 40 rokmi, sa spoločnosť 3M ESPE sústreďuje na vylepšovanie a rozširovanie tejto úspešnej rodiny výrobkov. Od tohto obdobia pribudlo do portfólia firmy niekoľko mäkkších a rýchlo tuhnučích verzií polyéteri. Spoločným znakom všetkých verzií sú výborné vlastnosti toku, hydrofília a ľahké snímanie po stuhnutí. Všetky materiály rodiny Impregum™ Penta™ sa miešajú v osvedčenom miešacom prístroji Pentamix™, čím je garantovaná vždy rovnaká, homogénna konzistencia a dosiahnutie vysokej presnosti odtlačkov.



POLYÉTEROVÉ ODTLAČKOVÉ MATERIÁLY				INDIKÁCIE					
LYŽICOVÉ HMOTY	Farby lyžicových hmôt		ODPORÚČANÉ KOREKČNÉ HMOTY	Farby korekčných hmôt	Odtlačky na korunky a mostíky	Odtlačky na inlay/onlay	Fixačné odtlačky	Odtlačky na implantáty	Funkčné odtlačky
	Automatické miešanie	Ručné miešanie							
MONOFÁZOVÁ TECHNIKA									
Impregum™ Penta™ Soft					●	●	●	●	●
Impregum™ Penta™					●	●	●	●	●
Soft Monophase™					●	●	●	●	●
Monophase™					●	●	●	●	●
1-KROKOVÁ TECHNIKA (DVOJITÉHO MIEŠANIA)									
Impregum™ Penta™ H DuoSoft™			Impregum™ Garant™ L DuoSoft™ Impregum™ Penta™ L DuoSoft™		●	●	●	●	●

Prehľad pracovných časov

Výrobok	Dávkovací systém	Pracovný čas, vrátane miešania (minúty : sekundy)	Intraorálny čas tuhnutia (minúty : sekundy)	Celkový čas tuhnutia, od začiatku miešania (minúty : sekundy)
MONOFÁZOVÁ TECHNIKA				
Impregum™ Penta™ Soft		2:45	3:15	6:00
Impregum™ Penta™		2:45	3:15	6:00
Monophase™		2:45	3:15	6:00
Soft Monophase™		2:45	3:15	6:00
1-KROKOVÁ TECHNIKA (DVOJITÉHO MIEŠANIA)				
Impregum™ Penta™ H DuoSoft™		2:30	3:30	6:00
Impregum™ Penta™ L DuoSoft™		3:15	3:15	6:30
Impregum™ Garant™ L DuoSoft™		2:00	3:30	5:30