

# Pentamix™ Lite

Automatický miešací prístroj



Nemôžete si dovoliť bubliny –  
môžete si *dovoliť* Pentamix™ Lite


## Pripravte sa na výhody automatického miešania:

- **homogénna**, reprodukovateľná kvalita, miešanie bez bublín
- **rýchly pracovný postup**, šetrí čas
- **ekonomické** a presné dávkovanie potrebného množstva materiálu
- **hygienické**, priame plnenie odtlačkovej lyžice a aplikačnej striekačky – žiadna krížová kontaminácia
- **efektívnejší** pracovný postup pre vyššiu produktivitu

## Doprajte svojej ambulancii precíznosť automatického miešania s **novým** výkonným prenosným miešacím prístrojom od 3M ESPE.

Skombinujte výkonný prenosný miešací prístroj Pentamix™ Lite s našimi odtlačkovými materiálmi Express™ XT VPS a 3M™ EPSE™ (Soft) Monophase a dostanete najvyššiu precíznosť odtlačkov a Vaše pracovné postupy plne pod kontrolu.

**Stačí len zapojiť, zapnúť a začať miešať.**

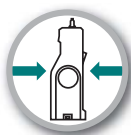

### KOMPAKTNÝ dizajn

Šetrí cenný priestor vo vertikálnej polohe počas pohotovostného režimu.



### POHODLNÁ A ČISTÁ prevádzka

Stlačte zelené tlačidlo štart a začnite plniť odtlačkovú lyžicu alebo aplikačnú striekačku priamo z prístroja.



### JEDNODUCHÝ štart


Rýchle a intuitívne nastavenie do pracovnej polohy.



### PRENOSNÝ dizajn

Jednoduchý transport medzi pracoviskami vďaka nízkej hmotnosti a integrovanej rukoväti.

Pozrite sa, aké jednoduché to môže byť.

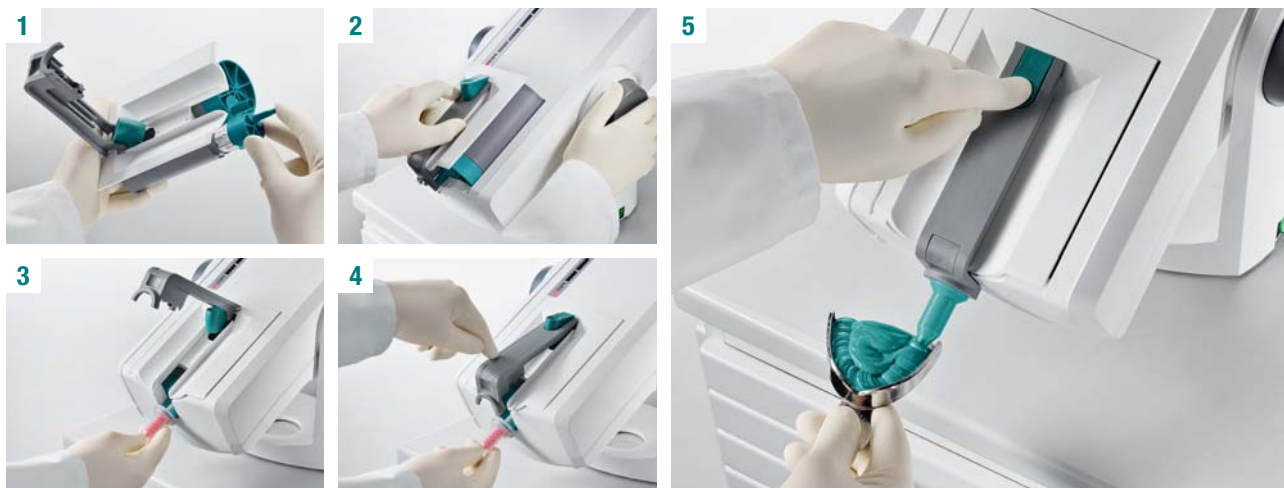

- 1 - Vložte fóliové náplne Penta™ s Vaším preferovaným odtlačkovým materiálom do zásobníka.
- 2 - Vložte zásobník do miešacieho prístroja Pentamix™ Lite.
- 3 - Nasadíte červenú zmiešavaciu kanylu Penta.

- 4 - Zatlačte uzamykaciu páčku, až pokiaľ nezaklikne.
- 5 - Miešanie a dávkovanie začne po stlačení zeleného tlačidla štart. Odtlačkovú lyžicu alebo aplikačnú striekačku môžete plniť priamo z prístroja homogénne namiešaným odtlačkovým materiálom.

## 1, 2, 3, 4, 5, A ŠTART!

### Informácie pre objednanie

Produkt č.	Produktové informácie
	<b>PENTAMIX™ LITE AUTOMATICKÝ MIEŠACÍ PRÍSTROJ A PRÍSLUŠENSTVO</b>
77903	<b>Pentamix™ Lite automatický miešací prístroj – 230 V/ 50 Hz (INT)</b> inkl. 1 Penta™ zásobník
77901	<b>Pentamix™ Lite automatický miešací prístroj – 230 V/ 50 Hz (CN)</b> inkl. 1 Penta™ zásobník
77902	<b>Pentamix™ Lite automatický miešací prístroj – 230 V/ 50 Hz (GB)</b> inkl. 1 Penta™ zásobník
77904	<b>Pentamix™ Lite automatický miešací prístroj – 230 V/ 50 Hz (India)</b> inkl. 1 Penta™ zásobník
77905	<b>Pentamix™ Lite automatický miešací prístroj – 230 V/ 50 Hz (TH)</b> inkl. 1 Penta™ zásobník
77908	<b>Pentamix™ Lite automatický miešací prístroj – 100-120 V/ 60 Hz (LA)</b> inkl. 1 Penta™ zásobník
77909	<b>Pentamix™ Lite automatický miešací prístroj – 230 V/ 60 Hz (KR/SA)</b> inkl. 1 Penta™ zásobník
77944	<b>1 Penta™ zásobník pre Pentamix™ Lite</b>
77919	<b>30 Penta™ zmiešavacie kanyly – červené</b>
77949	<b>50 Penta™ zmiešavacie kanyly – červené</b>
71210	<b>1 Penta™ sada striekačiek pre elastoméry</b> 1 aplikačná striekačka pre elastoméry, 4 striekačkové bubny, 5 intraorálnych koncoviek

## STOP RUČNÉMU MIEŠANIU ZAČNITE S AUTOMIXOM

**3M ESPE**

3M Slovensko s. r. o.  
Vajnorská 142  
831 04 Bratislava 3  
Slovensko  
Tel.: 02/491 05 211  
E-mail: innovation.sk@mmm.com  
[www.3mespe.sk](http://www.3mespe.sk)



[www.3MESPE.sk](http://www.3MESPE.sk)

3M, ESPE, Express, Penta a Pentamix sú obchodné značky spoločnosti 3M alebo 3M Deutschland GmbH. Používané pod licenciou Kanady.

© 2013, 3M.

Všetky práva vyhradené. (05.2014)