

Cupral®

Bewährt in Endodontie
und Parodontologie

- schnelle Ausheilung, auch ohne Antibiotika
- selektive Auflösung des Taschenepithels mit Membranbildung
- sicheres Abtöten aller Keime mit Langzeitwirkung, auch bei Anaerobiern und Pilzen
- als Breitbandtherapeutikum ohne Resistenzbildung vielfach bewährt



Indikation:

Indikation: Parodontitisbehandlung, Wurzelbehandlung mit und ohne Depotphorese®, indirekte Pulpenüberkappung

Vorteile:

- frei von Antibiotika
- deutlich stärkere Keimreduktion als Calciumhydroxid oder CHX
- permanente, polyvalente Wirkung (durch Regenerationsprozess)
- keine Geschmacksveränderungen

Anwendung:

Parodontitisbehandlung: mit getränktem Baumwollfaden in die Tasche geben, alternativ mit Einmalpipette oder austamponieren
Im Wurzelkanal: mit Lentulo einrotieren
Als Spüllösung: Messerspitze Cupral® auf 100 ml Aqua dest.

Cupral®

5 g Paste im Fläschchen
15 g Paste im Fläschchen
Spritze mit 1,8 g Paste und 5 Kanülen